

www.innovation-corp.co.jp

スタイルナビ インナーマッスル  
取扱説明書

**INNER MUSCLE**  
User Guide Book

pour A soigné  
**STYLENAVI**

INNER MUSCLE

INNOVATION corp.

この度は、プラソニエ スタイルナビ インナーマッスルをお買い上げいただき誠にありがとうございます。快適で安全にご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。

## 目 次

### ご使用前に

---

使用上の注意事項 .....	2-7
セット内容・各部のなまえ .....	8-9

### ご使用方法

---

本体の充電をする .....	10
ナビコードを接続する .....	10
ナビパッドを貼る .....	11
作動する .....	12-14
エクササイズの方法 .....	15-17
ウエストモード .....	15
ヒップモード .....	16
バックモード .....	17
Q & A .....	18

### 仕様／保証など

---

お手入れ／保管方法 .....	19
仕様／別売品 .....	20
保証とアフターサービス .....	21
保証書 .....	裏面

## EMSとは

電流を流して筋肉を繰り返し収縮させる運動で、効率よく筋肉を鍛え、引き締めを行うエクササイズです。

電氣的刺激（周波数・収縮時間・回復時間）を変化させることにより、スリミングや筋肉トレーニングなど目的に合わせた刺激を作り出すことができ、手軽にエクササイズができます。

## 特長

干渉波により、インナーマッスルを刺激。

目的に合わせて3つのモードを搭載。

- 気になるウエストの引き締めにウエストモード
- 形のいいヒップを目指すヒップモード
- 引き締まった美しい背中を目指すバックモード

各モードに、パワーを調整する機能付き。

- ウォーミングアップ  
ゆっくり身体をなじませる準備運動。
- ワークアウト  
集中的にエクササイズを行う本運動。
- クールダウン<sup>※</sup>  
リラックスさせながら終了する整理運動。  
(※ウエストモードとヒップモードのみの機能)

これらの機能により、身体への負担が少ないエクササイズが可能となり、初心者の方にもお気軽にご使用していただけます。

使用モードの経過が一目で分かるインジケーター(タイマー)を内蔵。  
楽々スリミング！




ナビパッドには、水洗いができる「ロングタイムパッド」を採用。

イラストや写真でわかりやすくナビゲートされる「取扱説明書」付きだから、今日から簡単エクササイズ！



## 使用上の注意事項 — 必ずお読みください —

ここに示した警告サインと表示記号は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者自身や他の人々への危害や財産等への損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される危害や損害の内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

- 警告サインの区分の意味は次のとおりです。

警告サイン	内 容
 危険	人が死亡または重傷を負う危険が、切迫して生じることが想定される内容を示しています。
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。*物的損害とは、家屋、家財、および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。


- 表示記号の意味は次のとおりです。

表示記号	内 容
	この表示記号は、禁止行為(してはいけないこと)を示します。
	この表示記号は、行為を強制(必ず守ること)することを示します。

本紙に記載されている内容に関し、ご不明点、ご質問等は、ご購入先またはプラソニエ カスタマーサポートまでご遠慮なくお問合せください。

その際は下記商品名と型番をお申し付け下さい。

プラソニエカスタマーサポート

 0120-373-426

(9:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)

<http://www.pour-a-soigne.jp>

メール: [info@pour-a-soigne.jp](mailto:info@pour-a-soigne.jp)

商品名: スタイルナビ インナーマッスル

型番: PS510

## ⚠ 危険



禁止

■ 次のような医療電子機器との併用は、絶対しないでください。

- ① ペースメーカーなどの体内植込型医療電子機器
- ② 人工心肺などの生命維持用医療電子機器
- ③ 心電計などの装着型医療電子機器
- ④ その他体内に装着している医療電子機器

\* これらの医療電子機器の誤作動をまねく恐れがあり大変危険です。

## ⚠ 警告



必ず守る

■ 次の人は、必ず医師と相談してご使用ください。

- ① 悪性腫瘍のある人
- ② 心臓に障害のある人
- ③ 血圧に異常のある人
- ④ 急性疾患のある人
- ⑤ 糖尿病の人
- ⑥ てんかんのある人
- ⑦ 脊椎カリエスの人
- ⑧ 感染症疾患のある人
- ⑨ 妊娠している人や出産直後の人
- ⑩ 皮膚知覚障害、または皮膚に異常を感じている人
- ⑪ 出血を伴う症状のある人
- ⑫ 有熱性疾患や安静を必要としている人
- ⑬ 精神機能、生理機能、内臓機能の弱い人
- ⑭ ケロイド体質の人
- ⑮ その他医師の治療を受けているときや療養中、身体に異常のあるとき

\* 事故や体調を悪化させる恐れがあります。

## ⚠ 警告



禁止

■ 次の箇所への使用はしないでください。

- ① 心臓及びその周辺部
- ② 首から上、頭部・顔部、口部など
- ③ わきの下
- ④ 脚の付け根
- ⑤ 性器およびその周辺部
- ⑥ ひざの裏
- ⑦ 静脈瘤のある箇所
- ⑧ 色素異常の箇所
- ⑨ 整形やイレズミをした箇所及び炎症、ニキビ、湿疹等皮膚トラブルのある箇所

\* 事故や体調不良を起す恐れがあります。

■ 次の体調のときは使用しないでください。

- ① 生理中
- ② 飲酒時
- ③ 薬の服用時
- ④ 疲労の激しいとき
- ⑤ 本製品を使用し、体質やお肌の異常を感じたとき

\* 事故や体調不良を起す恐れがあります。

■ 本製品の目的である人体のエクササイズ(シェイプアップ、リラックス)以外の目的での使用はおやめください。

\* 事故やトラブル、故障につながる恐れがあります。

## ⚠ 警告



禁止

- 治療器や塗布剤との併用はしないでください。**\*事故や体調不良を起す恐れがあります。**
- 本製品にセットされた指定のACアダプター以外は、使用しないでください。**\*火災、感電、けが、発熱の恐れがあります。**
- ナビコードの差込プラグは、本体の差込口以外には差し込まないでください。**\*事故や感電の恐れがあります。**
- 分解や改造、修理はしないでください。**\*発火、故障、事故の原因になります。**

## ⚠ 警告



必ず守る

- パワーは、いきなり強くしないで徐々に強度を上げながら使用してください。**\*強いショックを受け、事故や体調不良を起す恐れがあります。**
- ACアダプターの取り扱いは、次の事項を必ず守ってください。
  - ①電源は、正しく配線された交流AC100V・50/60H・10A以上のコンセントを使用してください。
  - ②コードの上に重い物を載せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねた状態で使用しないでください。
  - ③濡れた手で電源、ACアダプター、本製品に触れないでください。
  - ④電源を抜くときは、コードを持たず、必ず本体を持って引き抜いてください。
  - ⑤ご使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。**\*感電、ショート、発火する恐れがあります。**



ぬれ手禁止

- ぬれた手で使用しないでください。**\*感電やショート、事故の恐れがあります。**

## ⚠ 注意



必ず守る

■身体や本製品に異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。

①身体に異常を感じたら、医師に相談して指示に従ってください。

②本製品(本体、ACアダプター、ナビコード及びナビパッド)に損傷、異常等がある場合はすぐに使用を中止し、ご購入先かプラソニエカスタマーサポートまでご連絡ください。

■ナビパッド(導電用パッド)の取り扱い、次の事項を必ず守ってください。

①ジェル部が欠落し黒い導電部が直接肌に触れるとヤケドや炎症の原因になりますので、ご使用前に必ず、ジェル部が電導部を覆っていることを確認してください。

②身体に完全にナビパッドが貼りついた状態でご使用ください。はがれたりコードが外れたりしますと安全装置が働き作動停止します。粘着力が弱まり貼りつきが悪くなったものは、新しいナビパッドと交換してください。

③使用の途中(作動中)に他の部位にナビパッドを貼りかえる場合は、必ず電源ボタンを「OFF」にしてから貼りかえてください。

④ご使用中(作動中)にナビパッドにベルトやネックレスなどの金属が触れないようにしてください。\*強いショックや炎症等事故を起こす恐れがあります。

■電子機器を装着した状態で使用しないでください。\*腕時計、携帯電話などの誤作動の原因となります。



## ⚠ 注意



禁止

■お子様やご自分で意思表示ができない人のご使用は絶対避け、また、手の届くところへの保管もしないでください。

\*事故や体調不良を起こす恐れがあります。

浴室などの湿度の高いところや、入浴しながらの使用はしないでください。

\*強いショックを受け事故の原因となります。

■食後30分以内のご使用は、おやめください。

\*気分が悪くなる恐れがあります。

■自動車などの運転中や動きながらの使用はしないでください。

\*強い刺激を受けると事故やトラブルの原因になります。

■就寝しながら使用しないでください。

\*パッドが思わぬところに貼りついて、事故や体調不良を起こす恐れがあります。

■一ヶ所に長時間(40分以上)使用しないでください。

\*気分が悪くなったり、筋肉が疲労し体調不良を起こす恐れがあります。

■本製品をしばらく使用せず、再使用するときは、必ず本製品が正常に作動することを確認してください。


■本製品の取り扱いは、次の事項を必ず守ってください。

①水や他の液体をかけたり、浸したりしないでください。

②高温、多湿、振動のあるところ、直射日光のあたる場所での使用または放置、保管はしないでください。

## セット内容・各部のなまえ

<<必ずお確かめください>>

万一、不足したものがありましたら、プラソニエ カスタマーサポート(  0120-373-426)までご連絡ください。

### 本 体

#### 上 部

##### ● 電源ボタン

電源ON/OFFや行程中の強制終了を行います。  
各操作全てボタン長押し(2秒)

##### ● ロックボタン

ロック：ボタン長押し(2秒)  
ロック解除：ロック状態でボタン長押し(2秒)




#### 下 部


##### ● 通電/充電インジケータ

##### ● パッドジャック

##### ● 電源ジャック

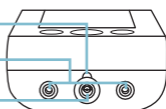

#### ディスプレイ部分

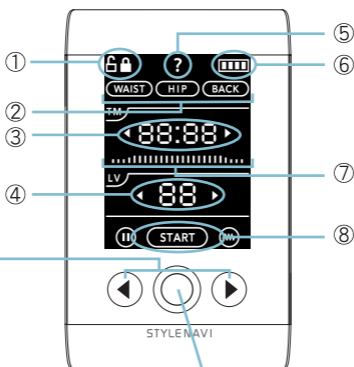

##### ● セレクトボタン

表示セレクト、タイマー調整、レベル調整を行います。


##### ● 決定ボタン

セレクトされた項目の決定、スタート、ポーズを行います。

① ロック解除  / ロック中 

② エクササイズモード

3種類のモードをご用意しております。

 気になるウエストの引き締め。

 形のいいヒップを目指します。

 引き締まった美しい背中を目指します。

③ タイマー

残り時間を表示。行程終了時には全点滅します。



#### ④ レベル

電源ON時は「00」表示です。  
レベルは「01」-「99」あります。

#### ⑤ 接続エラー ?


パッドなどの接続に不具合がある場合に点灯します。

#### ⑥ 電池残量

- ・電源ON :  マークは常に点灯。
- ・電池残量ゼロ :  マークは点滅。
- ・充電中 :  
内部セルが4段階の変化を繰り返しながら点灯。




- ・充電完了 :  マークは点灯。  
充電インジケータが点滅。




\*使用状況により、 マークの目盛りが増減を繰り返すことがあります。故障ではありません。

#### ⑦ フェーズ

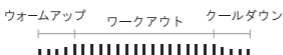エクササイズ行程を表示します。



#### ⑧ スタート・ポーズ・通電


-  タイマー設定後に点滅します。
-  行程中の一時停止時に点滅します。
-  通電時に、通電に合わせて点滅します。

## 付 属 品

- 取扱説明書 (保証書付)

- ナビコード (計2本)

- ナビパッド (計4枚)

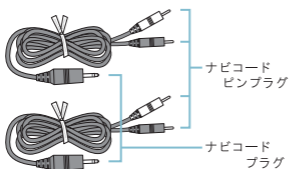

- パッド・コードケース

- ACアダプター




### 付属品をお確かめください

万一、不足したものがありましたら、ソニーカスタマーサポート (☎ 0120-373-426) までご連絡ください。


## 本体の充電をする

通電 / 充電インジケータが点灯し、充電完了時に点滅します。

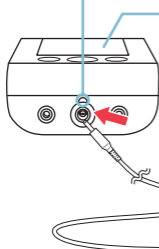

充電中は電池残量マークの内部セルが4段階の点灯を繰り返します。




充電完了時には、 マークが点灯状態になります。



約6時間でフル充電します。1回の充電で約3時間作動します。(使用環境により異なります。)


### 初めてお使いになるとき

保護シートは、ナビパッドの粘着部の乾燥を防ぐために貼ってありますので、ご使用寸前まではがさないでください。また、ご使用後はパッド・コードケースに保管してください。

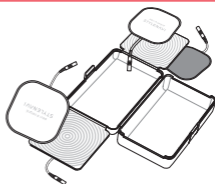

## ナビコードを接続する

- 1 電源が「OFF」になっていることを確認する。
- 2 下の図のように、ナビコードの二股に分かれている側とナビパッドをそれぞれ接続し、反対側を本体に接続する。

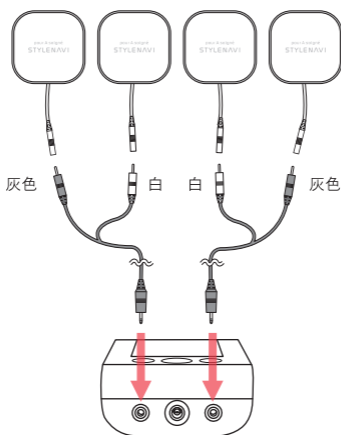


### ● ナビコードの取扱いについて

\*各ナビコードを極端に折り曲げたり、引っ張ったりしないでください。\*コードは外れないよう、しっかりとはめ、確実に接続させてください。使用中に外れますと安全装置が働き作動が停止します。

## ナビパッドを貼る

- 1 ナビパッドを貼る部位のお肌を清潔にし、汗ばんでいるときはよく乾かしてください。
- 2 保護シートをはがします。

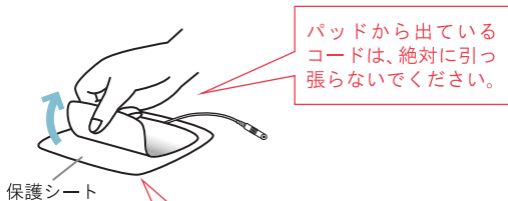

### ●初めてお使いになるとき●


保護シートは、ナビパッドの粘着部の乾燥を防ぐために貼ってありますので、ご使用寸前まではがさないでください。また、ご使用後はパッド・コードケースに保管してください。

### ！重要

特に新しいパッドは、粘着力が強く、無理に引っ張ると、ジェル部がパッドから取れてしまうことがあります。黒い電導部が直接肌に触れるとヤケドになる等大変危険です。ジェル部が電導部を覆っていることを確認してご使用ください。

- 3 1枚ずつ、折り曲げないように、エクササイズする部位に貼ります。下記図のように、コード部分でクロスして貼りつけてください。

- \*必ず4枚全てのナビパッドを貼ってご使用ください。
- \*ナビパッドは肌に密着するように貼ってください。使用中にはがれたりしますと安全装置が働き作動が停止します。

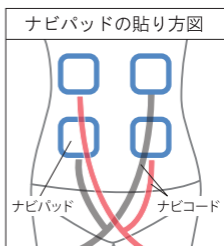


### ◆パッドの取扱いについて◆


- \*折り曲げないでください。
- \*粘着面は、なるべく指でふれないようにしてください。
- \*重ならないように貼ってください。
- \*肌からはがす時はコードを引っ張らないでください。
- \*パッド・コードケースにしまってお保管してください。
- \*粘着力が落ちてきたらお手入れをしてください。(19ページ参照)

## 作動する

※充電しながらのご使用は出来ません。

### 1 電源を入れる。

電源OFF時から電源ボタン  長押し(2秒)でディスプレイの全表示が全点灯し電源がONになります。

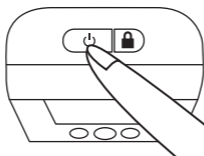

### 2 エクササイズモードを選ぶ。

#### **WAIST** ウエストモード




気になるウエストの引締め。(15ページ)

#### **HIP** ヒップモード




形のいいヒップを目指します。(16ページ)

#### **BACK** バックモード

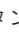美しい背中を目指します。(17ページ)

- 1) 3種類のモードの中から1つをセレクトボタン   で選択。選択状態のモードは点滅します。
- 2) 決定ボタン  でモードが決定され、常時点灯にかわります。
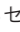
### 3 タイマーを設定する。

タイマー(分)は「20:00」、「30:00」、「40:00」の中からセレクトボタン   で選択し、決定ボタン  で設定してください。

- ・決定後は常時点灯、行程終了時には全点滅します。
- ・タイマーは残り時間を表示します。

	20:00	30:00	40:00
ウォームアップ	2分	5分	5分
ワークアウト	16分	20分	30分
クールダウン	2分	5分	5分
合計	20分	30分	40分

\*各エクササイズ時間には、多少の誤差が生じることがあります。

#### 4 刺激の強さを調節する。

刺激のレベルは「00」から「99」まであります。電源ON時は「00」と表示され、行程スタート後に点滅が始まりますので、セレクトボタン ◀▶ でレベルを決定してください。

**注意：必ず通電 / 充電インジケータが点灯し、パッドに通電している時にレベルの調整を行なってください。使い始めから刺激を強くしますとパルス\*が強く流れ、急な強い刺激を受けますので、徐々にならしていくようにして下さい。**

※パルスとは、ごく短時間だけ流れる電流や電波のことです。


- ・「00」の時に決定ボタンもしくは左向きセレクトボタン◀を押しても反応しません。
- ・決定後もセレクトボタンでレベル調整ができます。
- ・ロック中の場合はボタン操作が不能となります。（ただし、電源ボタンだけは、長押し(2秒)で電源OFFの操作が可能です）

#### エクササイズが目安(18ページ「Q&A」参照)

時間	1ヶ所1回約40分
回数	1日1回(同箇所)
強さ	心地よさを目安に

#### 5 行程表示機能について。

常に画面上に点灯表示されています。スタートを左端とし、タイマー設定に連動して現時点での行程部分を点滅させます。全行程終了時には全点滅します。

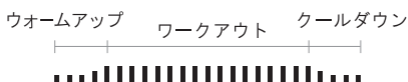




#### 6 エクササイズ中に一旦中断したいとき。

エクササイズの途中で行程を一旦中断したい時に決定ボタン◎を押すと一時停止状態となり、画面上のⓂが点滅し PAUSE が点灯します。



再開したいときは、決定ボタン◎を押します。中断したところから再開しますが、レベル表示は「00」に戻りますので、再度セレクトボタン◀▶で再設定してください。

## 7 ロックをかける / 解除する。

初期設定はロック解除  の状態となっています。  
ロックボタン  を長押し（2秒）すると、画面上に  マークが表示され、電源ボタン、セレクトボタン、決定ボタンのいずれも操作不能となります。  
（ただし、電源ボタンだけは、長押し（2秒）で電源OFFの操作が可能です。）

## 8 電源を切る。


エクササイズ終了後は電源を切ってください。  
電源ボタン長押し（2秒）で電源がOFFになります。  
\*行程中の強制終了の場合も、電源ボタン長押し（2秒）で電源がOFFになります。

注意：引き続きエクササイズを行なう場合は、決定ボタン  を押して12ページの「 エクササイズモードを選ぶ」から設定をしてお使いください。

## 9 収納する。

ナビパッドを放置しておく乾燥し、粘着力が弱まります。パッド・コードケースに入れて保管してください。

### ●パッド・コードケースの収納見本●

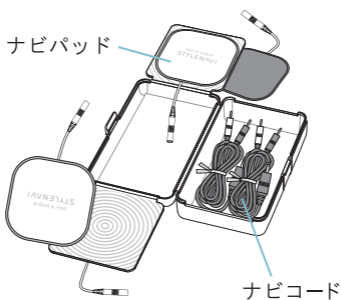

### こんなときはどうする？


- ◆エクササイズの途中で終了したいときは…  
電源長押し（2秒）で電源を切る。
- ◆エクササイズの途中で他のコース（プログラム）に切り替えたいときは…
  1. 電源長押し（2秒）で電源を切る。
  2. 電源長押し（2秒）で電源を入れ、新たなモードを選ぶ。



気になるウエストの引き締めに。

### 1 パッドを貼る。

パッドは、写真のようにコード部分でクロスさせて貼りつけてください。その際、肌が汗ばんでいる場合には乾いたタオル等でよく拭いてから貼るようにしてください。

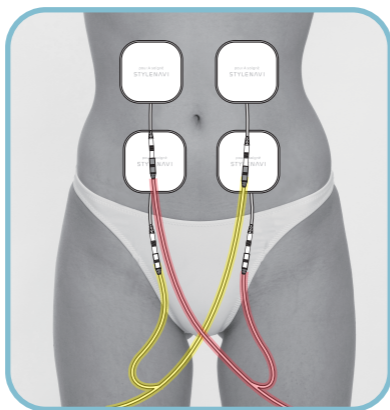

※パッドの貼る位置によって刺激が異なる場合があります。その時は位置を少しずつずらすなどして調節してください。

### 2 電源を入れる。 ※充電しながらのご使用は出来ません。

電源ボタン長押し（2秒）で電源がはいります。

### 3 エクササイズモードを選択する。

セレクトボタン◀▶で **WAIST** を選択、決定ボタン◎で設定します。\*選んだモードのみが点灯します。

### 4 タイマー作動。

エクササイズが開始しますので、お好みの出力に調整します。

### 5 電源を切る。

電源ボタン長押し（2秒）で電源が切れます。

### 6 パッドをはがす。

## 注 意

- ナビパッドを放置しておく乾燥し、粘着力が弱まります。パッド・コードケースに入れて保管してください。（14ページ参照）
- エクササイズを行なっている時は、ナビパッドがはがれることのないように、読書などくつろいだ状態でご使用ください。尚、万一はがれた場合は自動で作動停止となりますので、一旦、電源を「OFF」にし、再度貼りなおしてください。

# エクササイズ方法


## ヒップモード

HIP

形の良いヒップを目指します。

### 1 パッドを貼る。

パッドは、写真のようにコード部分でクロスさせて貼りつけてください。その際、肌が汗ばんでいる場合には乾いたタオル等でよく拭いてから貼るようにしてください。

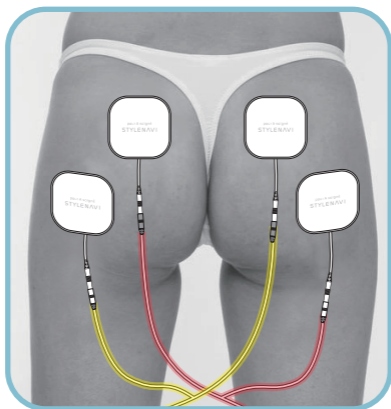

※パッドの貼る位置によって刺激が異なる場合があります。その時は位置を少しずつずらすなどして調節してください。

### 2 電源を入れる。 ※充電しながらのご使用は出来ません。

電源ボタン長押し（2秒）で電源がはいります。

### 3 エクササイズモードを選択する。

セレクトボタン◀▶で **HIP** を選択、決定ボタン◎で設定します。\*選んだモードのみが点灯します。

### 4 タイマー作動。

エクササイズが始まりますので、お好みの出力に調整します。

### 5 電源を切る。

電源ボタン長押し（2秒）で電源が切れます。

### 6 パッドをはがす。

## 注意

- ナビパッドを放置しておく乾燥し、粘着力が弱まります。パッド・コードケースに入れて保管してください。（14ページ参照）
- エクササイズを行なっている時は、ナビパッドがはがれることのないように、読書などくつろいだ状態でご使用ください。尚、万一はがれた場合は自動で作動停止となりますので、一旦、電源を「OFF」にし、再度貼りなおしてください。

## エクササイズ方法


### バックモード

BACK

美しい背中を目指します。

#### 1 パッドを貼る。

パッドは、写真のようにコード部分でクロスさせて貼りつけてください。その際、肌が汗ばんでいる場合には乾いたタオル等でよく拭いてから貼るようにしてください。

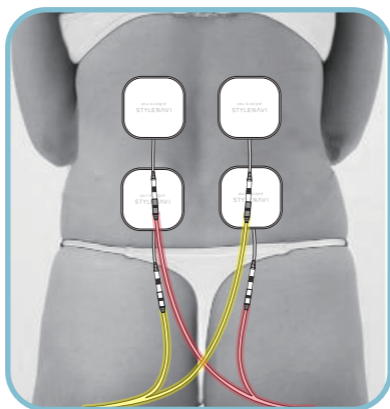

※パッドの貼る位置によって刺激が異なる場合があります。その時は位置を少しずらすなどして調節してください。

#### 2 電源を入れる。 ※充電しながらのご使用は出来ません。

電源ボタン長押し（2秒）で電源がはいります。

#### 3 エクササイズモードを選択する。

セレクトボタン◀▶で **BACK** を選択、決定ボタン◎で設定します。\*選んだモードのみが点灯します。

#### 4 タイマー作動。

エクササイズが始まりますので、お好みの出力に調整します。

#### 5 電源を切る。

電源ボタン長押し（2秒）で電源が切れます。

#### 6 パッドをはがす。

### 注意

- ナビパッドを放置しておく乾燥し、粘着力が弱まります。パッド・コードケースに入れて保管してください。（14ページ参照）
- エクササイズを行なっている時は、ナビパッドがはがれることのないように、読書などくつろいだ状態でご使用ください。尚、万一はがれた場合は自動で作動停止となりますので、一旦、電源を「OFF」にし、再度貼りなおしてください。

Q：毎日使ってもいいのですか？

---

A：インナーマッスルを鍛える為の、筋肉の形成運動ですので、48時間程度をあけて週2～3回程度がお勧めです。

Q：筋肉が動かないのですが？

---

A：原因として、

①パッドの位置が適切でない。

動かしたい筋肉の両端につけていますか？電源を切って少し位置を変えて、試してください。自分の位置を覚えておくことが大切です。

②パワーが少ない。

ピリピリするだけでは、筋肉の運動は起こりませんので、効果は少ないです。ピリピリくるところから、もう少しレベルを上げますと、筋肉が運動します。

Q：どのくらいで効果が現れますか？

---

A：太り方、体質等、個人差で違ってきますが、一般的に3週間から1ヶ月くらいで筋肉が引き締まるなどの感じが現れてきます。

Q：使用中に電池残量マークの目盛りが増えたり減ったりする。

---

A：多くの電流が流れる為に増減することがありますが故障ではありません。

## お手入れ / 保管方法

### 本体のお手入れ方法

- ① 電源を切り、本体からACアダプター、ナビコード（含ナビパッド）をはずしてお手入れください。
- ② 本体が汚れたときは、やわらかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に布を浸しよく絞ってから、汚れをふき取り、乾いた布で仕上げてください。

※パッドジャックや電源ジャックが濡れないように十分にご注意ください。

※シンナー、ベンジン、研磨剤の入った洗剤、化学ぞうきんは使用しないでください。

### ナビパッドが貼りつきにくくなったとき

- ① 電源を切り、ナビコードからナビパッドをはずします。
- ② 水分を含ませた綿棒等で粘着面に水分を補います。汚れのあるときは、少量の水を流しながら指先で軽く数秒で洗います。
- ③ 十分に水を切って、粘着面を自然乾燥させます。
- ④ パッド・コードケースに入れて保管してください。

\*ナビパッドは消耗品ですので、粘着力が低下したり、傷んだ場合は、別売品をお買い求めください。(21 ページ)

### ナビパッドのお取り扱いについてお願い

●お湯や洗剤、薬品(シンナー、ベンジンなど)は使用しないでください。●つめやブラシなどで粘着面を傷つけないでください。●長時間、頻繁に水洗いしないでください。●高温多湿、直射日光のあたる場所に置かないでください。

### 保管場所

保管場所は、高温多湿、振動、直射日光、お子様の手の届くところを避け、安全なところに保管してください。特に、ナビパッドは品質維持のためにパッド・コードケースに入れ冷暗所等に保管してください。

※本製品を廃棄されるときは、お住まいの各自治体の指示に従い、廃棄処分してください。

## 仕様 / 別売品

### ■ 本体

項目	内容
商品名称	ブラソニエ スタイルナビインナーマッスル
型番	PS510
最高出力	約165mA (Pk to Pk 1K $\Omega$ 負荷時)
サイズ	110×65×28mm
素材	ポリカーボネイト・ABS樹脂
周波数	5000Hz～5060Hz
消費電力	4.5w (1K $\Omega$ 負荷時)
重量	約225g
原産国	中国

### ■ ACアダプター

項目	内容
入力	AC100V 50/60Hz
出力	DC5V 1A
原産国	中国

### ■ パッド・コードケース

項目	内容
素材	PP

### ■ 別売品

項目	詳細
ナビパッド	1組4枚入り
ACアダプター	1ヶ
ナビコード	2本

・お求めは販売店又は当社カスタマーサポートへ。

## 保証とアフターサービス

本製品には下記に記載しています「保証規定」に基づき、お買上げの日から1年間の保証が付いています。保証書は必ず「お買上げ年月日」「販売店」など、所定事項の記入及び記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。尚、故障ないし異常が発生したときは、使用せず、下記に記載しています当社「プラソニエ カスタマーサポート」まで詳しい内容をお知らせください。

本製品に対する  
ご質問、ご意見、ご相談は  
プラソニエ カスタマーサポート  
までご連絡ください。

※お問い合わせの際は下記商品名と型番をお申し付け下さい。

 **0120-373-426**

9:00～17:00(土曜、日曜、祝祭日を除く)

<http://www.pour-a-soigne.jp>  
メール: [info@pour-a-soigne.jp](mailto:info@pour-a-soigne.jp)  
品名: スタイルナビインナーマッスル  
型番: PS510



### 【保証規定】

1. 保証期間内に取扱説明書及び添付の注意書き等に従い正常な状態で使用していて故障した場合には、本規定に基づき無料修理致します。但し、消耗品、付属品、メンテナンス費用等は除きます。
2. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
  - (1) 本保証書のご提示がないとき
  - (2) 本保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、または、文字を書き換えられたもの
  - (3) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷のとき
  - (4) 火災、地震、水害、落雷、公害、異常電圧、その他天変地異、戦争や紛争等による故障及び損傷のとき
  - (5) 使用上の誤り、事故、乱用、異電圧及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (6) 注意事項を遵守しなかった原因による故障
  - (7) お客様の不注意や故意による故障
3. 修理を依頼される場合はお買上げ販売店ないし当社へ本保証書を添えてご依頼ください。やむを得ず送付される場合は送料をご負担願います。
4. 本保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本保証書は個人の使用についてのみ有効です。業務用に使用の場合は本保証書の対象外です。

修理や部品のご依頼は、ご購入先または、  
プラソニエカスタマーサポートまでご相談ください。

## 保証書

商品名	プラソニエ スタイルナビ インナーマッスル 〈PS510〉
保証期間	本体：1年 付属消耗部品は適用外
お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前
	ご住所 〒
	TEL ( )

●お買い上げ店（販売店名・住所・TEL）

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社に修理をご依頼ください。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または発売元にお問い合わせください。

※包装・仕様等は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。

—長年ご使用の電気器具の点検を！—

### 愛情点検



●ご使用の際、このようなことはありませんか？

- ・スイッチを入れても、ときどき作動しないことがある。
- ・コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・作動中に異常な音や、コゲくさいニオイがする。
- ・プラグ、コード、本体、アダプターなどが異常に熱い。

### ご使用中止

故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。

—発売元—

イノベーション株式会社  
〒236 - 0004  
横浜市金沢区福浦 1-11-23  
TEL. 045-789-3761(代)